

SEED POD

シードポッド 精液運搬用保温器

自宅で採取した精液を
温度変化から守り、安全に
持ち運ぶための保温容器です。

New



*専用滅菌容器
70cc 採精用コンテナ
(別売り)



SEED POD
本体

- 本体が魔法瓶構造になっており、精子に適した温度(常温)を維持します。
- 女性でも持ち運びやすいコンパクトなサイズです。(高さ:88mm/直径:58mm)


使用方法

- ① 本体のフタを開けておき、内部の温度を常温にします。
- ② 専用の滅菌容器*に採精します。
- ③ 滅菌容器を本体内に入れ、フタを閉めます。

精子の適温は 常温(20℃程度)です。

※諸説あり一定の見解は示されていません。

- 25℃で運動率、生存率が優位に高かった。
- 正常形態率も常温が良好。(A. Thijissen et al., 2014)

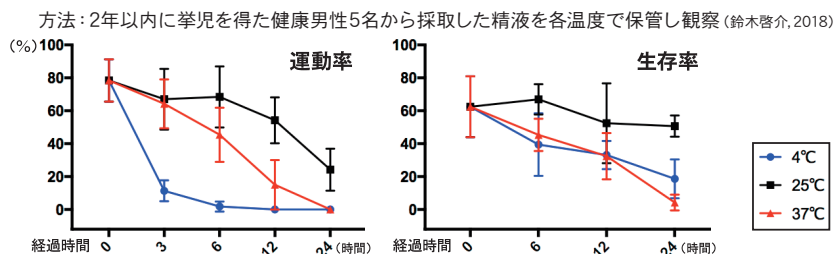

カタログ番号	品名	規格
NM-SPOD-06	SEED POD (シードポッド)	6個/箱

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ● 株式会社TENGAヘルスケア

TENGA
HEALTHCARE

(20181031YN)